

## 1. FLEX SUCTOR KIDS - Português

- DEFINIÇÃO: Suctor para saliva.
- INDICAÇÃO: Para sucção de saliva.
- COMPOSIÇÃO: Polipropileno e elastômero.
- ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES: Não reutilize o produto.
- DESCARTAR APÓS O USO.
- INSTRUÇÕES DE USO:
  - 1. Esterilize, previamente ao uso com calor úmido (autoclave): 121°C, com 01 ATM de pressão por 30 minutos;
  - 2. Adapte FLEX SUCTOR KIDS à unidade de aspiração.

## 2. FLEX SUCTOR KIDS - Inglês

- DEFINITION: Saliva ejector.
- INDICATION: For the suction of saliva.
- COMPOSITION: Polypropylene and elastomer.
- WARNING/PRECAUTIONS: Do not reuse the product.
- DISCARDING AFTER USE.
- INSTRUCCIONS FOR USE:
  - 1. Before using, proceed the sterilization: autoclave at 121°C with pressure of 1 ATM for 30 minutes;
  - 2. Adapt FLEX KIDS EJECTOR to the suction unit.

## 3. FLEX SUCTOR KIDS - Espanhol

- DEFINICIÓN: Suctor para saliva.
- INDICACIÓN: Para succión de saliva.
- COMPOSICIÓN: Polipropileno y elastómero.
- ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES: No reutilice el producto.
- DESECHAR DESPUÉS DEL USO.
- INSTRUCCIONES DE USO:
  - 1. Esterilice previamente al uso: Calor húmedo (autoclave): 121°C, con 01 ATM de presión por 30 minutos;
  - 2. Adapte FLEX SUCTOR KIDS a la unidad de aspiración.